



ALLERGEN




CONTACT TEST



PATCH TEST KİTLERİ
2018

PATCH TEST (YAMA TESTİ)

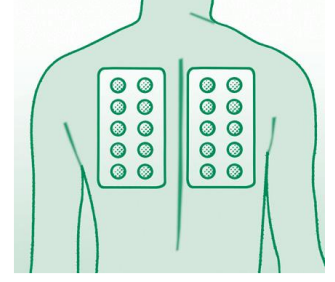

Patch Test; alerjik kontakt dermatit (temas egzaması) denilen egzamanın tanısında kullanılan bir deri testidir. Alerjik kontakt dermatit, alerjen madde ile önceden duyarlanmış kişilerde tekrarlayan temaslarda 48-96 saat içinde ortaya çıkan alerjik bir egzamadır. Yama testi bu hastalığa sebep olabilecek alerjenleri saptamak amacıyla uygulanan tanısal bir yaklaşımdır.

Patch Test, alerjik kontakt egzema tanısında önemli ve güvenli bir metoddur. Kontakt egzema mesleksel hastalıkların % 80 ini oluşturur. Bu nedenle hastanın mesleği nedeniyle maruz kaldığı uyaranlar (alerjenler) ve sürekli temas eden maddeler (irritanlar) göz önünde bulundurulmalıdır.

Patch Test Kitleri Uluslararası Kontak Dermatit Araştırma Grubu tarafından önerilen allerjen maddeleri içermektedir.

UYGULAMA

Vazelin içinde hazırlanmış olarak bulunan alerjenlerin doğrudan sırtta yapıştırılması şeklinde uygulanır. Negatif kontrol olarak saf vazelin tercih edilir. Bantlar sırtın üst bölümüne uygulanır. Sırt derisi yağlı veya terliyse alkol ile silinerek temizlenir. Yapıştırılan test 48 saat sırtta kalacağından hastalara banyo yapmamaları, terlemeye ya da bantların ayrılmasına yol açabilecek fiziksel aktivitelerde bulunmamaları açıklanmalıdır. Verilen cevabı baskılayabileceğinden, testin bir hafta öncesinde, sırtta uygulanan krem tarzı ilaçların kesilmiş olması, alerji hapi veya kortizon içeren ilaçların kullanılmaması gerekir. 48 saat sonra hekim tarafından bantların yerleri kalemle işaretlenerek en az 30 dakika sonra değerlendirme yapılmalıdır. Geç reaksiyon veren alerjenler sebebiyle test yeri 72 ve 96. saatlerde de tekrar hekim tarafından değerlendirilmelidir.

Patch Test yorumlama ve değerlendirme;

	Değerlendirme	Klinik Yorum
0	Reaksiyon yok	Kontakt alerji yok
+ / -	Hafif eritem	Kuşkulu reaksiyon
+	Eritem, infiltrasyon ve ödem	Olası kontakt alerji
++	Eritem, infiltrasyon ve vezikülasyon	Alerjik kontakt dermatit
+++	Vezikülobüllöz ve/veya ülseratif reaksiyon	Alerjik kontakt dermatit (kesin)
IR	İrritasyon	Kontakt alerji yok

İrritan reaksiyonlar genellikle 48. saat sonunda en belirgin durumdadır. Burada, keskin sınırlı ve çok hafif düzeyde infiltrasyon ile kendini gösteren lezyonların varlığı söz konusudur. Eritem ve folliküler papüllerden, püstül, bül ve nekrozlara dek giden irritan reaksiyonlar tanımlanmıştır. Materyalin uygulandığı bölgeye sınırlı buruşuk deri görünümü de tipik bir bulgudur. İrritan reaksiyonların çoğu, test bantları deriden uzaklaştırıldıktan sonra hızla geriler.

PATCH TEST KİTLER

STANDART SERİ					
Sıra	ALERJEN	Yoğunluk %	Sıra	ALERJEN	Yoğunluk %
1	Antrakinin	2	16	Mercapto Mix	2
2	Peru Balsam	25	17	Benzokain	5
3	PPD Mix	0,6	18	Quaternium 15	1
4	Hidrokinon	1	19	Quinoline Mix	6
5	Potasyum Dikromat	0,5	20	Nitrofurazon	1
6	Propilen Glikol	2	21	Paraben Mix	15
7	4-tert-butylphenol formaldehid resin	1	22	Epoksi Resin	1
8	Neomisin	20	23	Tiyomersal	0,05
9	Triklosan	1	24	Terebentin	10
10	Kathon CG	1	25	Carba Mix	3
11	Kobalt (II) Klorür	1	26	Prometazin	1
12	Lanolin	30	27	Nikel Sülfat	5
13	Thiuram Mix	1	28	Colophony	20
14	Etilendiamin	1	29	4-Phenylenediamine	1
15	Parfüm Mix	8	30	Formaldehid	1

ÇOCUK SERİSİ		
Sıra	ALERJEN	Yoğunluk (%)
1	Thiuram Mix	1
2	Nikel Sülfat	5
3	Lanolin	30
4	Mercapto Mix	2
5	Fragrance Mix	14
6	Methylidibromo Glutaronitrile	0,5
7	Neomisin	20
8	Kathon CG	1
9	Hindistan cevizi yağı	0,5
10	Parfüm Mix	8


KORTİKOSTEROİD SERİSİ		
Sıra	ALERJEN	Yoğunluk (%)
1	Betametazon	1
2	Budesonid	0,01
3	Klobetazol	1
4	Deksametazon	1
5	Hidrokortizon	1
6	Triamsinolon	1
7	Vazelin	100

KOZMETİK SERİSİ

Sıra	ALERJEN	Yoğunluk (%)
1	Bütil asetat	25
2	Etil asetat	10
3	Metil alkol	100
4	İzopropil alkol	100
5	Toluen	50
6	Butil fitalat	5
7	Benzofenon	5
8	Mika	5
9	Epoksi reçinesi	1
10	Resin tosylamide / formaldehyde	10
11	Nitroselüloz	3

KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİK SERİSİ

Sıra	ALERJEN	Yoğunluk (%)
1	Germall 115	2
2	BHT	2
3	Resin tosylamide / formaldehyde	10
4	Trietanolamin	2,5
5	Bronopol	0,5
6	Chloroacetamide	0,2
7	Sorbik asit	2
8	Ammonium thioglycolate	2,5
9	Amerchol L-101 (Lanolin)	100
10	Klorheksidin	0,5
11	Hindistan cevizi yağı	0,5

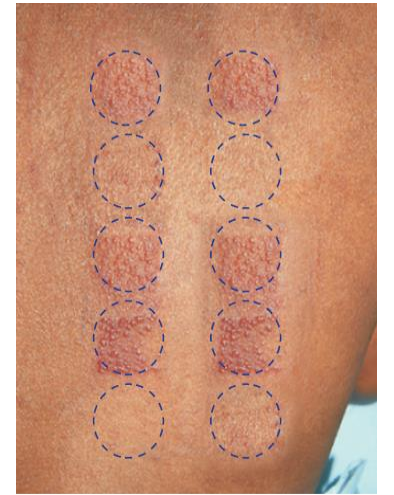

ALLERGEN

AllerGen Medikal

İstiklal Mah. Hacırüstemođlu Sok. Özer Apt. No:41/20

Ümraniye – İstanbul Ph:+90 507 443 93 66 mail: info@allerjipricktest.com

www.allerjipricktest.com